



Augen-Tropfen Hyaluron 0,2 %

NEU
Optimierte
Anwendung

Lindernde Wirkung bei trockenen Augen
Zur intensiven Befeuchtung
Ohne Konservierungsstoffe


Gebrauchsanweisung

Verwendungszweck:

- Wirken befeuchtend und erhöhen die Gleitfähigkeit auf der Augenoberfläche
- Lindern Rötungen, Ermüdung und Beschwerden der Augen, die durch äußere Einflüsse (Wind, Rauch, Schadstoffbelastungen, längere Sonneneinstrahlung, Meersalz und Wasser) sowie längere Bildschirmtätigkeit verursacht wurden
- Wirken lindernd bei Überbeanspruchung der Augen durch das Tragen von Kontaktlinsen
- Sind geeignet zum einfacheren Einsetzen und Entfernen von Kontaktlinsen

Zur häufigen Anwendung geeignet, auch mehrmals täglich bzw. nach ärztlicher Verordnung.

Gebrauchshinweise: **NEU** optimierte Anwendung durch Soft-Touch Flasche

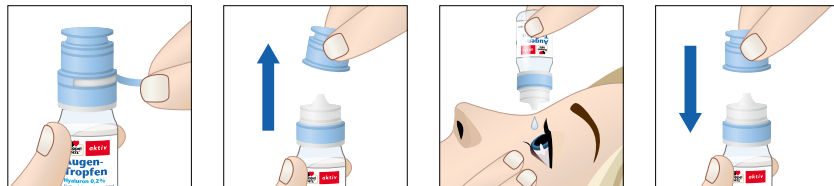

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Originalitätsverschluss
- Entfernen Sie die Schutzkappe und öffnen Sie die Flasche
- Halten Sie die Flasche mit der Öffnung nach unten über das jeweilige Auge
- Ziehen Sie das Unterlid leicht nach unten
- Tropfen Sie durch leichtes Drücken auf die Flasche jeweils 1 oder 2 Tropfen in jedes Auge
- Die Schutzkappe nach Gebrauch wieder aufsetzen. Der Inhalt bleibt nach Anbruch 3 Monate haltbar
- Durch das allmähliche Leeren der Flasche kann ein höherer Druck zur Ausgabe des Produktes nötig sein

Nach erstmaliger Anwendung kann die Sehfähigkeit kurzfristig beeinträchtigt sein. Auch kann als Folge der Augenreizung vorübergehend ein geringfügiges Brennen, ein Stechen oder eine Reizung auftreten. Sollten diese Wirkungen anhalten oder sich verschlimmern, informieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt.

⚠ Warn- und Sicherheitshinweise:

- Das Produkt sollte nur von einer einzigen Person angewendet werden.
- Nur zur Verwendung am Auge.
- Nicht anwenden, wenn das Behältnis bereits vor dem ersten Gebrauch beschädigt oder nicht vollständig verschlossen ist.
- Berühren Sie bei der Anwendung nicht das Auge oder andere Oberflächen mit der Tropfer Spitze des Behältnisses.
- Nicht anwenden bei bekannten Unverträglichkeiten gegen einen der Inhaltsstoffe.
- Bei auftretenden Nebenwirkungen brechen Sie die Behandlung ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Nach Verbrauch ist der Behälter ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zusammensetzung:

0,2 % Natriumhyaluronat; 0,2 % Hypromellose, destillierte Wasser aus Aloe vera, Kamille, Vaccinium myrtillus (Heidelbeere) und Rosa canina (Hagebutte), Borsäure, Natriumtetraborat-Dekahydrat, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke

Doppelherz Augen-Tropfen Hyaluron 0,2 % sind eine sterile Lösung ohne Konservierungsstoffe oder Phosphatpuffer.

Doppelherz Augen-Tropfen Hyaluron 0,2 % sind sterile Augen-Tropfen mit wohltuend lindernder Wirkung. Sie enthalten zwei Wirkstoffe: **Hyaluronsäure und Hypromellose, welche feuchtigkeitsspendend sind und den Tränenfilm stabilisieren und schützen.**

Bei trockenen Augen wird ein Film zum Schutz der innersten Schicht der Hornhaut vor äußeren Einflüssen geschaffen. Dieser Schutzfilm setzt nach und nach Wasser frei und sorgt für eine dauerhafte Befeuchtung der Augen.

Zusätzlich enthalten Doppelherz Augen-Tropfen Hyaluron 0,2 % eine Kombination natürlicher Inhaltsstoffe:

- **Destilliertes Kamillen-Wasser** ist für seine lindernden und erfrischenden Eigenschaften bekannt. Es wird daher bei Rötungen der Augen aufgrund klimatischer und äußerer Einflüsse angewendet.
- **Destilliertes Aloe Vera-Wasser** ist für seine feuchtigkeitsspendende Wirkung bekannt.
- **Destilliertes Wasser aus Hagebutten** für seine vitaminisierenden und erfrischenden Eigenschaften.
- **Destilliertes Wasser aus der Heidelbeere** wird wegen seiner Schutzwirkung für die Augenschleimhaut geschätzt und bei Ermüdungserscheinungen der Augen angewendet.

Verpackung:
10 ml Mehrdosenbehältnis, ohne Konservierungsstoffe.

Angaben zur Aufbewahrung:
Nicht über 25 °C lagern.
Nach Anbruch 3 Monate verwendbar.

Haltbarkeit:
Bei ungeöffneter Verpackung: Nach Ablauf des auf der Verpackung und dem Mehrdosenbehältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Hersteller:
COC Farmaceutici s.r.l.
Via Modena, 15
40019 - Sant'Agata Bolognese (Bo)
Italien

Vertrieb und Information:
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
Deutschland

CE 0373
MEDIZINPRODUKT

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet 02.01 von 04/2015




Queisser
PHARMA
GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg